

fast kits

RHDV + RHDVb

exopol



Polígono Río Gállego D/8, 50840 San Mateo de Gállego, Zaragoza



[exopol@exopol.com](mailto:exopol@exopol.com)



+34 976 69 45 25



+34 650 16 03 08

## MUESTRAS

hígado: tomar 0,1 gr de hígado, mezclarlo con 1ml de agua y homogeneizarlo

exudado abdominal



mantener el kit a temperatura ambiente



no abrir el envase hasta su uso

xx/xxxx

no superar la fecha de caducidad

## PASOS A SEGUIR



añade **siete gotas** de líquido abdominal o de la muestra homogeneizada (hígado) en el tubo y **agítalo para una buena dispersión**




corta la punta del tapón y **deposita cuatro gotas en ambas ventanas circulares** del dispositivo

Los **fast kits** son tests de inmunocromatografía con menor sensibilidad que las pruebas de laboratorio, por lo que conviene **muestrear de 3 a 5 animales**




LEE LOS RESULTADOS A LOS 10 MINUTOS


VÁLIDO

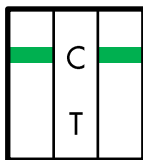

RDHV negativo

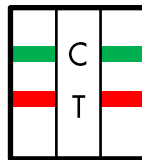


RDHV positivo a cepas variantes

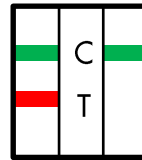

RDHV positivo a cepas clásicas

INVÁLIDO

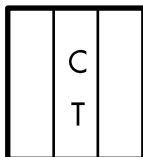

¿porqué queda invalidado un kit?

- cantidad insuficiente de muestra
- exceso de muestra
- forma de proceder incorrecta
- deterioro de los reactivos