

zonas sucias - calzas

objetivo

evaluar zonas sucias en las que se espera una alta prevalencia de patógenos
- indicado en patógenos de transmisión fecal -

instrucciones de uso



condiciones de envío

❄️ congelar y enviar con acumuladores de frío


análisis: paneles o determinaciones individuales por qPCR

zonas limpias - toallitas

objetivo

evaluar la limpieza y desinfección de zonas limpias (salas, zonas se paso, manillas, superficies, etc.)
a. valorar si la limpieza se ha hecho correctamente
b. comprobar la disminución de la carga de un patógeno muestreando antes y después

instrucciones de uso

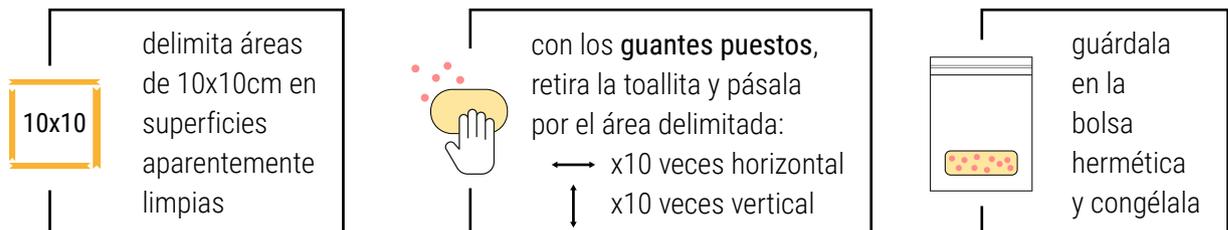

condiciones de envío

❄️ congelar y enviar con acumuladores de frío

análisis: paneles o determinaciones individuales por qPCR

control de aguas

objetivo

complementar los análisis de control de calidad del agua rutinarios

instrucciones de uso



elige el punto de recogida del agua y llena completamente un bote estéril de 1 o 1,5L



de grifo: dejar correr el agua unos minutos y evitar que el bote lo toque



de balsa: sumergir el bote completamente

condiciones de envío

❄️ congelar y enviar con acumuladores de frío

análisis: paneles o determinaciones individuales por qPCR

control de ambiente

objetivo

monitorización ambiental evaluando la presencia de patógenos
- indicado en patógenos de transmisión aérea-

instrucciones de uso

coloca el equipo en las zonas elegidas y ponlo en marcha según las indicaciones

1. focaliza la zona de entrada de aire hacia el punto elegido
2. colocar lo más cerca posible de los animales infectados: en función del tamaño de la sala, repetir* el muestreo en diferentes puntos estratégicos.
* hasta 3 repeticiones con cada set (cono + solución)
3. monitorización: un resultado negativo no descarta la ausencia del patógeno




condiciones de envío

❄️ congelar y enviar con acumuladores de frío

análisis: paneles o determinaciones individuales por qPCR

muestreos ambientales

- zonas sucias
- zonas limpias
- aguas
- ambiente

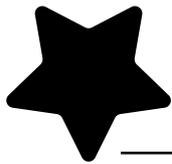

guía **exopol**



exopol

Polígono Río Gállego D/14
50840, San Mateo de Gállego
Zaragoza, España