


tarjetas FTA para muestreos en aves (30€)

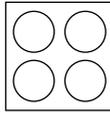

x5  
tarjetas  
FTA


toma una **muestra del órgano** deseado con un **hisopo estéril** y aplica la muestra **rodando** cada uno de los hisopos por **toda la superficie del círculo**



1 círculo: máximo **3 hisopos** de diferentes animales




1 tarjeta: máximo **1 tipo de órgano**

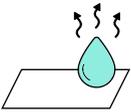

deja **secar la tarjeta completamente al aire**

métela en una bolsa zip antes de su envío

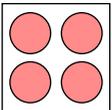

se podrá analizar por qPCR el **pool de los 4 círculos** de una tarjeta

la **sensibilidad diagnóstica** en muestras de tarjetas FTA es inferior a la obtenida en muestras de órganos o hisopos, pudiendo afectar al resultado en caso de trabajar con pools si la prevalencia de la enfermedad es baja