


FTA: análisis individuales (qPCR)

incluye



x5 tarjetas FTA

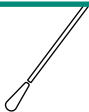

x5 hisopos



x5 tubos



x5 pipetas



x5ml suero

SEGÚN EL TIPO DE MUESTRA:



A) órganos o tejidos

impronta en toda la superficie del círculo



B) sangre o líquidos

con la pipeta, vierte gotas hasta que esté completamente mojado




C) hisopos: un hisopo por círculo

1. pon **1ml de solución salina** en el tubo estéril
2. introduce el hisopo en el tubo y **homogeneiza la muestra**
3. con la pipeta, vierte **gotas en el círculo** hasta que esté **completamente mojado**

UNA VEZ TERMINADO EL MUESTREO:

deja **secar 30 minutos** completamente al **aire** y métela en la bolsa zip antes de su envío a temperatura ambiente

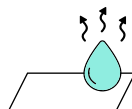

⚠ IMPORTANTE ⚠

la sensibilidad diagnóstica en muestras de tarjetas FTA es inferior a la obtenida en muestras de órganos o hisopos, pudiendo afectar al resultado en caso de trabajar con pools si la prevalencia de la enfermedad es baja