

fluidos orales (x1 muestreo)

incluye



cuerda



guantes



tubo



bolsa



1. Utiliza una cuerda por cada 15-20 animales



2. Colócala a la altura de los ojos en una zona de fácil acceso



3. Deja que los animales interactúen con ella durante 15-20 minutos



4. Exprime el fluido de la cuerda dentro de la bolsa



5. Transfiere el fluido a un tubo estéril

Tiempos y condiciones de envío

< 24h ❄️ congelado

> 24h ❄️ congelado

Observaciones: congelar y enviar con acumuladores de frío