

## hisopos protegidos de 74cm (x10 muestreos)

incluye




x10 hisopos protegidos



x10 tubos con medio de transporte AMIES




1. Extrae de la forma más aséptica posible el hisopo uterino estéril de su envoltorio e introdúcelo con movimientos rotatorios sin que el hisopo salga de su camisa protectora

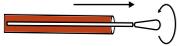

2. Una vez dentro, empuja suavemente para que salga el hisopo de la camisa protectora (se recomienda realizar movimientos rotatorios y asegurar una correcta recolección de muestra biológica).



Cuando hayas tomado la muestra, vuelve a introducir el hisopo dentro de su camisa protectora y retíralo suavemente.

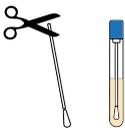

3. De la forma más aséptica posible, exterioriza el hisopo con el que se ha tomado la muestra, corta el extremo (12 cm aproximadamente) e introdúcelo en el tubo asegurándote de que el extremo queda introducido en el medio de transporte.

### Tiempos y condiciones de envío

< 24h t<sup>a</sup> ambiente (máx. 23°C)

> 24h refrigerado