

lavados broncoalveolares (12€/5 muestras)

incluye



x5 sondas



suero fisiológico



x5 jeringas y agujas



x5 tubos



1. Carga la jeringa con 20ml de suero



2. Introduce la sonda por el orificio nasal del animal



3. Introduce el suero y aspiralo inmediatamente. Sigue aspirando mientras retiras la sonda para obtener muestras de la tráquea



4. Transfiere el lavado a un tubo estéril

Tiempos y condiciones de envío

< 24h  refrigerado

> 24h  congelado

Observaciones: la congelación afectará al cultivo microbiológico