


muestreo de leche - mamitis (10 cajas de 10 tubos)


incluye



incluye 10 packs de:
x10 tubos estériles
9 muestras individuales + 1 de tanque

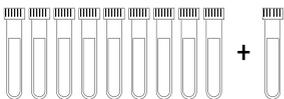

1. Localiza animales que presenten síntomas y que no hayan sido tratados

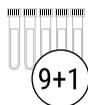

2. Toma una muestra de leche en cada uno de los tubos y usa el décimo para tomar una muestra de leche de tanque

3 Que al menos 3 muestras procedan de **ovejas de 1er parto**



Desecha los primeros chorros

Si no tienes suficientes casos puedes...

- Tomar muestras de animales con mamitis y congélaslas hasta acumular varias
- Tomar muestras de animales positivos al Test de California
- Tomar muestras de animales con un elevado número de células somáticas

Tiempos y condiciones de envío

< 24h refrigerado

> 24h congelado