


muestreo de lenguas (x5 muestreos)

incluve





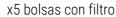

x5 bolsas zip



x5 clips de ajuste



1. Guarda la bolsa con filtro abierta en el congelador e introduce en ella las lenguas a medida que haya lechones muertos



2. Cuando se hayan acumulado un número significativo tras una o dos semanas, enrolla la parte superior y ciérrala con el clip



3. Para evitar perder líquido, introduce la bolsa dentro de la bolsa zip

Tiempos y condiciones de envío

< 24h 🎇 congelado

> 24h 🎇 congelado

Observaciones: congelar y enviar con acumuladores de frío