


muestreo de lenguas (15€/5 muestreos)


incluye

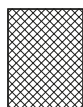


x5 bolsas con filtro




x5 bolsas zip

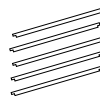


x5 clips de ajuste

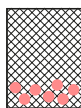

1. Guarda la bolsa con filtro abierta en el congelador e introduce en ella las lenguas a medida que haya lechones muertos

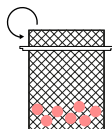

2. Cuando se hayan acumulado un número significativo tras una o dos semanas, enrolla la parte superior y ciérrala con el clip

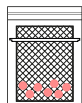

3. Para evitar perder líquido, introduce la bolsa dentro de la bolsa zip

Tiempos y condiciones de envío

< 24h ❄️ congelado

> 24h ❄️ congelado

Observaciones: congelar y enviar con acumuladores de frío