

órganos (25€/5 muestreos)

incluye



x5 cubos estancos



x5 bolsas por cubo



x10 bridas por cubo



x5 acumuladores de frío



Mete los acumuladores de frío en el congelador cuando recibas el pack para que estén listos en el momento de enviar las muestras



1. Introduce un órgano por bolsa para evitar contaminaciones y anúdala





Si mandas digestivos, anuda los extremos de los intestinos con las bridas



2. Introduce el acumulador de frío previamente congelado en el cubo y asegúrate de que está bien cerrado

Tiempos y condiciones de envío

< 24h  refrigerado

> 24h  toma un hisopo para realizar la microbiología
 y congela el órgano (no servirá para histopatología)