

cultivo de D.nododus (pedero ovino)

incluye



x1 bolsa estanca



x1 clip de cierre



x1 sobre generador de anaerobiosis




x5 hisopos con medio STUART



1. Usar un hisopo para cada animal para tomar la muestra



2. Introduce el hisopo en el medio de transporte y **déjalo sin cerrar completamente** dentro de la bolsa de plástico

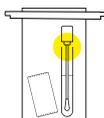

3. Rasga la **bolsa de AnaeroGen™**, saca el sobre de su interior e introdúcelo con los hisopos en la bolsa de plástico y **ciérrala con el clip inmediatamente**



Realiza rápidamente la operación: el sobre de AnaeroGen™ no puede estar más de 1min en contacto con el ambiente



Máximo 5 hisopos y un sobre por bolsa



Es normal que el sobre se caliente un poco debido a la formación de una atmósfera anaeróbica



4. Indícanos que las muestras son para realizar el **Panel podal** y mándanoslas a **temperatura ambiente**