

lavados traqueobronquiales (x5 muestreos)

incluye



x5 sondas



suero fisiológico



x5 jeringas y agujas



x5 tubos

podemos mandarte



abrebocas: disponible en dos tamaños (adultos/lechones)



1. Sujeta al animal por el hocico con un lazo de manera que mantenga la cabeza lo más elevada posible



2. Coloca el abrebocas al fondo de la boca y mantenlo firme



3. Carga la jeringa con 20ml de suero



4. Introduce la sonda lo más pegada posible al paladar. Inyecta el suero y aspíralo inmediatamente. Después, retira la sonda



5. Transfiere el lavado a un tubo estéril

Tiempos y condiciones de envío

< 24h  refrigerado

> 24h  congelado

Observaciones: la congelación afectará al cultivo microbiológico