

## raspados traqueobronquiales (x5 muestreos)

incluye



x5 sondas  
específicas



sueros  
monodosis

podemos mandarte

abrebocas  
adultos/lechones



1. Sujeta al animal por el hocico con un lazo de manera que mantenga la cabeza lo más elevada posible



2. Coloca el abrebocas al fondo de la boca y mantenlo firme



3. Introduce la sonda lo más pegada posible al paladar hasta la entrada de la glotis. Cuando deje de chillar, introducimos la sonda hasta la tráquea. La retiramos inmediatamente.



4. Introduce 2ml de suero en el tubo, corta el extremo de la sonda e introdúcelo en el tubo

### Tiempos y condiciones de envío

< 24h refrigerado

> 24h congelado

Observaciones: la congelación afectará al cultivo microbiológico