

raspados prepuciales en toros (x5 muestreos)

incluye




x5
raspadores
prepuciales



x3
sueros
monodosis



x5
tubos
estériles

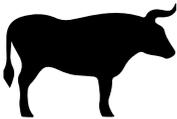

Muestrea animales en reposo sexual (>15 días)

Usar un raspador por toro



1. Limpia el área prepucial: corta los pelos, lava con agua o suero estéril (evita desinfectantes) y seca la zona con papel



2. Introduce el extremo hasta el fondo del prepucio y realiza al menos 20 movimientos antero-posteriores



Si el toro orina, repite el muestreo con un raspador diferente



3. Pon 2ml de suero en el tubo y desprende el smegma recogido en el tubo mediante movimientos giratorios

Tiempos y condiciones de envío

< 24h  refrigerado

> 24h  congelado