

## lavados broncoalveolares (x5 muestreos)

incluye



x5 sondas



suero fisiológico



x5 jeringas y agujas



x5 tubos



1. Carga la jeringa con 20ml de suero



2. Introduce la sonda por el orificio nasal del animal



3. Introduce el suero y aspíralo inmediatamente. Sigue aspirando mientras retiras la sonda para obtener muestras de la tráquea



4. Transfiere el lavado a un tubo estéril

## Tiempos y condiciones de envío

< 24h 👢 refrigerado

> 24h 💥 congelado

Observaciones: la congelación afectará al cultivo microbiológico