



## muestreo de tonsilas (x10 muestreos)

incluye

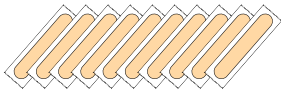

x 10 depresores linguales  
envueltos individualmente

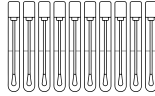

x 10 hisopos  
con medio

podemos mandarte



linterna



abrebocas  
adultos/lechones



1. Sujeta al animal por el hocico con un lazo de manera que mantenga la cabeza lo más elevada posible



2. Coloca el abrebocas al fondo de la boca y mantenlo firme



3. Localiza las tonsilas con la linterna



4. Estimula la superficie de las tonsilas con un depresor lingual



5. Recoge la secreción que queda en el raspador con un hisopo

### Tiempos y condiciones de envío

< 24h t<sup>a</sup> ambiente

> 24h refrigerado