



muestreo de tonsilas (€/10 muestras)

incluye

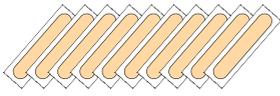

x 10 depresores linguales
envueltos individualmente

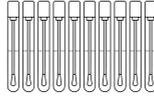

x 10 hisopos
con medio

podemos mandarte



linterna (7€)

abrebocas (50€)
adultos/lechones



1. Sujeta al animal por el hocico con un lazo de manera que mantenga la cabeza lo más elevada posible



2. Coloca el abrebocas al fondo de la boca y mantenlo firme



3. Localiza las tonsilas con la linterna



4. Estimula la superficie de las tonsilas con un depresor lingual



5. Recoge la secreción que queda en el raspador con un hisopo

Tiempos y condiciones de envío

< 24h t^a ambiente

> 24h refrigerado