

raspados prepuciales (40€)




x10
raspadores
prepuciales



x10
sueros
monodosis



x10
tubos
estériles

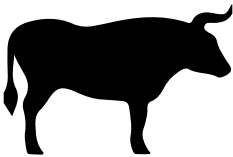

- ▶ muestrear animales en reposo sexual (>15 días)
- ▶ usar un raspador por toro



limpiar el área prepucial cortando los pelos y lavando si es necesario con agua o suero estéril (evitar desinfectantes). secar con papel



introducir el extremo hasta el fondo del prepucio



realizar al menos 20 movimientos antero-posteriores



si el toro orina, repetir la toma de muestra con un nuevo raspador



desprender el smegma recogido con el raspador en el tubo (**poner 2ml de suero**) mediante movimientos giratorios



enviar refrigerados en una caja de corcho con acumuladores de frío