

fast kits
Cryptosporidium

exopol



Polígono Río Gállego D/8, 50840 San Mateo de Gállego, Zaragoza



exopol@exopol.com



+34 976 69 45 25



+34 650 16 03 08

MUESTRAS

heces líquidas
tomadas directamente
del recto con el vial
contenido intestinal



mantener el kit a
temperatura
ambiente

PRECAUCIONES




no abrir el
envase hasta
su uso

xx/xxxx


no superar la
fecha de
caducidad

PASOS A SEGUIR

recoge la muestra
con el palito que
viene en el vial,
introdúcelo, cierra
y **agita el tubo**
para asegurar
una buena
disolución

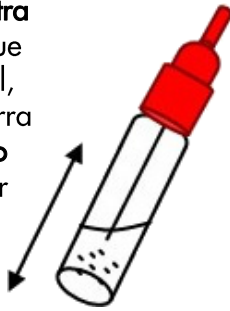

corta la punta del tapón y
deposita cuatro gotas en
la ventana circular del
dispositivo

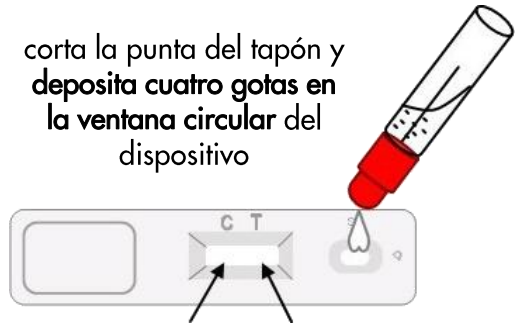

Los **fast kits** son tests de inmunocromatografía con menor sensibilidad que las pruebas de laboratorio, por lo que conviene **muestrear de 3 a 5 animales**




LEE LOS RESULTADOS A LOS 10 MINUTOS

POSITIVO




NEGATIVO

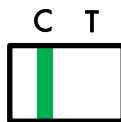

si tienes sospechas pero el resultado es negativo se recomienda repetir la prueba con otro kit (falsos negativos)

INVÁLIDO

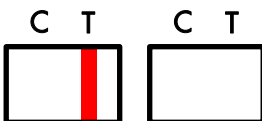

¿porqué queda invalidado un kit?

- cantidad insuficiente de muestra
- exceso de muestra
- forma de proceder incorrecta
- deterioro de los reactivos