


toma de muestras

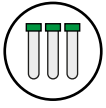

tubos estériles - tapón verde
(lavados, leches,...)



tubos sin anticoagulante - tapón rojo
(sueros para serología)



tubos con EDTA - tapón morado
(sangre entera para hemoparásitos)



frascos con cierre hermético
(heces, tejidos, órganos formolados...)



hisopos con medio de transporte
(muestras animales vivos/necropsia)



jeringas y agujas estériles
(obtención de líquidos)



sondas y solución salina
(lavados bronquioalveolares)




raspadores prepuciales
(toros)



hojas de **bisturí**



calzas
(para control de suelos)

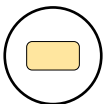

toallitas
(para control de superficies)



equipo Coriolis
(para control de ambiente)

¿te falta material?
¡solicita nuestros packs de **muestreo!**

Lavados bronquioalveolares (1 pack = 5 muestras)
sondas específicas por especie y edad
suero fisiológico
jeringuillas y agujas
tubos
bolsa isotérmica
sobre acolchado

Fluidos orales (1 pack = 1 muestra)
cuerda específica
tubo
guantes
bolsa isotérmica

Órganos y fetos (1 pack = 5 muestras pequeñas)
cubo estanco
sobre isotérmico
bolsas anudables
bridas (extremos paquetes digestivos)

Raspados prepuciales (1 pack = 10 raspadores)
raspadores estériles
tubos estériles
suero fisiológico


Muestras ambientales (alquiler equipo CORIOLIS)
equipo esterilizado
tubo
colector con medio específico

Control de suelo (1 pack = 1 calzas)
calzas de tejido específico
calzas de plástico
guantes
bolsa estéril

Control de superficie (1 pack = 1 toallita)
toallita absorbente
guantes estériles
bolsa hermética





envío de muestras

plazos y condiciones de envío

 t° ambiente

 refrigerado

 congelado

	<24h	>24h
 sangre suero		 no congelar sueros con coágulo
 heces	 análisis microbiológico: envío inmediato	 estudio coprológico: no congelar
 leche	 envío inmediato para evitar contaminaciones	 congelar casos puntuales hasta acumular varias
 hisopos con medio de transporte		
 raspados cutáneos	 para cultivo de dermatofitos	 para cultivo de dermatofitos
 lavados bronquioalveolares		 afecta al aislamiento microbiológico
 fluidos orales	 congelar y enviar con acumuladores de frío	 congelar y enviar con acumuladores de frío
 raspados prepuciales (toros)		 tomar un hisopo para microbiología
 órganos	 envío inmediato	 tomar un hisopo (para microbiología)  órgano (no sirve para histopatología)
 calzas		
 toallitas		
 ambiente (Coriolis)	 congelar y enviar con acumuladores de frío	 congelar y enviar con acumuladores de frío