

pack de muestreo lavados bronquioalveolares



bolsa verde

=



x5 sondas



x5 tubos



x1 suero



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
x5 jeringas



x5 etiquetas



x1 aguja




sobre


=



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x1 frío
instantáneo



x1 hoja de
remisión de
muestras

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

x1 bolsa
isotérmica

otros packs de muestreo disponibles

raspados bronquioalveolares
hisopos
tubos de mamitis
órganos y fetos

solicítalos



+34 976 69 45 25



+34 650 16 03 08

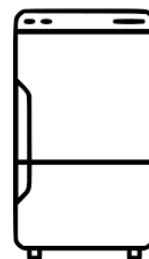


exopol@exopol.com


1. toma las muestras, **numera los tubos** y refrigéralos 2h



+



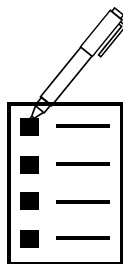2. rellena la **hoja de remisión de muestras** e introdúcela de nuevo en el sobre



+



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
3. **activa el frío instantáneo** y mételo junto a los tubos y el sobre en la **bolsa isotérmica**



+



4. mete todo dentro del **sobre acolchado** y pega la **pegatina de envío** con nuestra dirección



+



elige el **servicio 24h a portes debidos** que prefieras

NACEX 24h.

nº 5014/5688 24
tfno local

MRW 24h.

nº 04700/808241
tfno: 902 300 400

SEUR 24h. ó

SEUR frío (+10€)
tfno: 902 10 10 10