


## control de superficie: toallitas (3€)

### ▶ materiales para tomar muestras de superficie

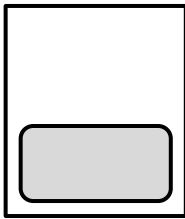

bolsa con la  
toallita  
absorbente




guantes  
estériles

### ▶ forma de tomar la muestra

1 retire la toallita absorbente de la bolsa **con los guantes estériles**



pasa la **toallita** por **1 m<sup>2</sup>**  
aproximadamente para valorar  
la limpieza general de la  
superficie

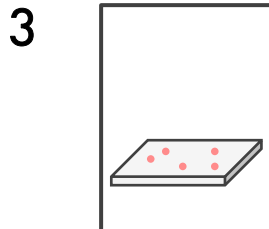

**guárdala en la bolsa hermética**  
que te damos para que lo  
analicemos por qPCR  
cuantitativo